



むくみ対策 ぐつ下

日本製

締めつけない

きついのが苦手な方に



肌に優しい 綿68%

その他：ポリウレタン、ナイロン、アクリル、ゴム


効果

静脈還流の促進により

血行促進・リンパの流れ促進


つま先アップで脚の運動を自然に促し 締めつけずにむくみ対策!!

歩行促進で運動量増加

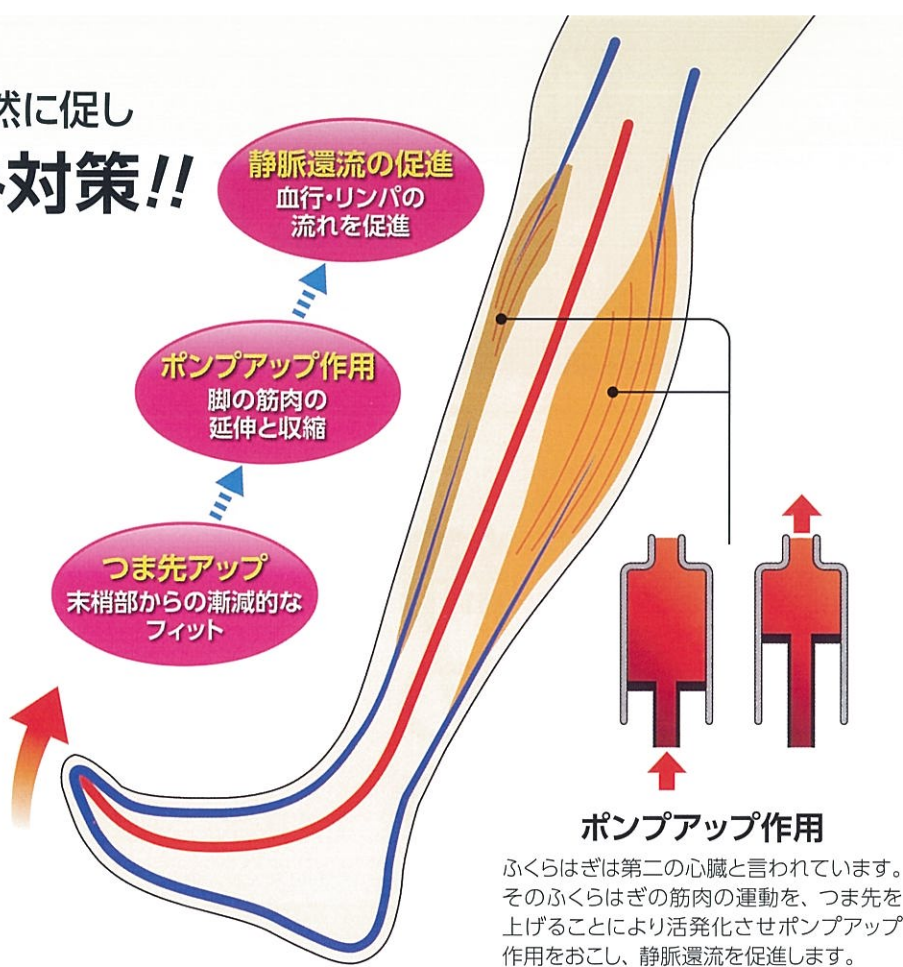

【勤務前・勤務後のむくみ度比較】(当社製比較)


精神科看護師・医療職者
普段からむくみを感じている者 対象 約28名

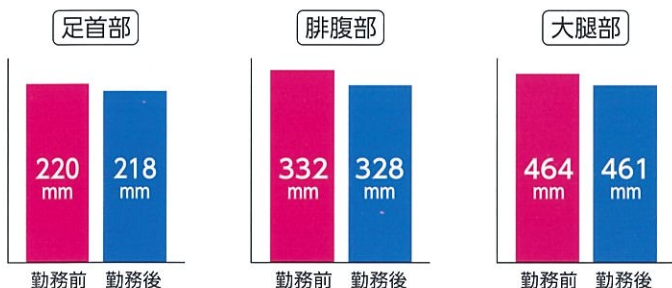

むくみを抑える効果があることが分かりました

【満足度の比較】(当社製比較)

精神科医療職者・総合病院医療職者 約220名

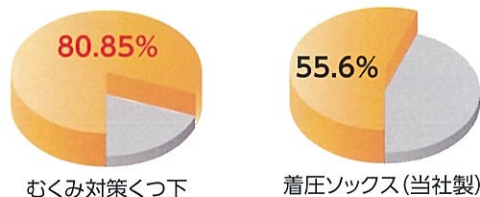

【保守・点検に係る事項】

- 1) 繰り返し使用する場合は、傷やほつれ、繊維の劣化等が無いことを確認してから使用してください。
- 2) 洗濯の際には、塩素系漂白剤は絶対に使用しないでください。
- 3) はきやすさを保つために中性洗剤・柔軟剤を使用し水か30℃位のお湯で必ず手洗いしてください。やむを得ず洗濯機をご使用の際は、必ずネットに入れて洗濯してください。
- 4) その他の取り扱い方法はパッケージの表示マークに従ってください。



※上記以外での洗濯は著しい収縮を招き靴下本来の機能を失いますので指定の洗濯を行ってください。

靴下カラー ●黒 ○白 ●ベージュ

サイズは内側のラインの色で確認してください

サイズ別内側色

白	グレー	黒	茶	コン	ベージュ
22~23cm	23~24cm	24~25cm	25~26cm	26~27cm	27~28cm



【製造販売業者】

三興化学工業株式会社

〒739-0611 広島県大竹市新町2丁目11-4
TEL 0827-52-3111 FAX 0827-53-7622
http://sanko-kagaku.co.jp

【製造業者】

株式会社コーポレーションパールスター
医療機器製造業登録番号 34BZ200022

希望小売価格 3,500円

発売元